



Aplikátory a odklipovače endoskopických ligačních klipů

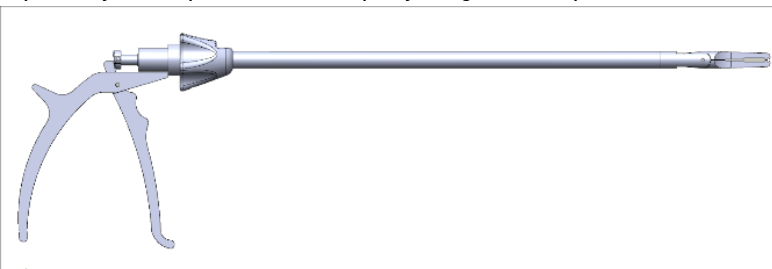

*Uložte tento návod na bezpečném místě!
Před použitím vyčistěte a sterilizujte.*

Rx Only

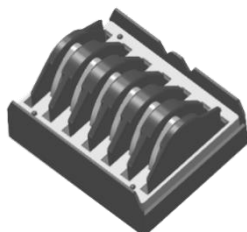

ANKA SAĞLIK GEREÇLERİ
SAN. İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
Esenşehir Mah. Haseki Sok. No:36
Ümraniye-İstanbul / TURKEY
Tel:+90 216 3150477 Fax:+90216 3150478
web: www.ankasaglik.com.tr
e-mail: info@ankasaglik.com.tr



Nepoužívejte, pokud byl obal otevřen nebo poškozen.

POPIS ZAŘÍZENÍ

Ankalaps Safe/Lock klipy jsou jednorázové, nevstřebatelné, neaktivní implantabilní prostředky určené k použití při obecných chirurgických zákrocích, které vyžadují podvázání cév nebo tkání. Klipy jsou vyrobeny z acetylhomopolymeru lékařské kvality. Ankalaps Safe/Lock aplikátory jsou určeny k použití jako podávací zařízení pro klipy Ankalaps Safe/Lock. Endoskopické klipové aplikátory jsou opakovaně použitelné nástroje, které ručně nabíjejí a dodávají jeden klip najednou. Aplikátory nejsou určeny pro kompatibilitu s jiným typem podvazovacího klipu.

Ankalaps Safe/Lock odklipovače se používají jako odstraňovací zařízení Ankalaps Safe/Lock Ligating Clips. Odklipovače jsou vyrobeny z nerezové oceli.

Informace o velikosti a kompatibilitě produktů naleznete v tabulce níže.

Klipy	Velikost	Barva	Endoskopické klipové aplikátory	Endoskopické odklipovače	Velikost kanyly
AMLG 6	Středně velký	Zelený	101.080C	101.038A	5/5,5mm
ALP6	Velký	Nachový	101.080B		
AXLY6	Extra velký	Zlatý	101.080A	101.038B	10/11 mm

INDIKACE

Klipy Ankalaps Safe/Lock jsou určeny k použití při zákrocích zahrnujících podvazování cév nebo tkáňových struktur. Chirurgové by měli použít klip odpovídající velikosti cévy nebo tkáňové struktury, která má být podvázána, tak, aby klip zcela obepínal cévu nebo tkáňovou strukturu.

Aplikátory Ankalaps Safe/Lock jsou určeny k použití jako podávací zařízení pro podvazovací klipy Ankalaps Safe/Lock. S těmito aplikátory nelze použít jiné podvazující klipy.

Endoskopické odklipovače Ankalaps Safe/Lock jsou určeny k odstraňování nevstřebatelných polymerních ligačních klipů Ankalaps.

KONTRAINDIKACE

Klipy Ankalaps Safe/Lock nejsou určeny k použití jako prostředek pro okluzi vejcovodů.

Ankalaps Safe/Lock klipy jsou kontraindikovány pro použití při ligaci renální tepny během laparoskopických nefrektomií dárců.

VAROVÁNÍ

Ligační klipy Ankalaps Safe/Lock

- Opakované zpracování výrobků určených pouze k jednorázovému použití může mít za následek zhoršení výkonu nebo ztrátu funkčnosti. Opakované použití výrobků určených pouze k jednorázovému použití může vést k expozici virovým, bakteriálním, plísňovým nebo prionovým patogenům. Pro tyto výrobky nejsou k dispozici ověřené metody čištění a sterilizace ani pokyny pro opětovné zpracování podle původních specifikací. Tento výrobek není určen k čištění, dezinfekci nebo opakované sterilizaci.
- Klipy Ankalaps Safe/Lock jsou určeny k trvalému podvázání cév a/nebo tkáňových struktur. Pokud je nutné klip odstranit, může endoskopický odklipovač klipů Ankalaps Safe/Lock umožnit odstranění klipu. Pokud by během odstraňování klipu došlo k jeho zlomení, měl by chirurg zlomený klip z místa operace odstranit.

POZNÁMKA: Podvazovací klipy Ankalaps Safe/Lock jsou dodávány sterilní. Kazety s podvazovacími klipy nesterilizujte. Kazety s podvazovacími klipy Ankalaps Safe/Lock obsahují baryum a jsou radiotransparentní .

Ankalaps Aplikátory a odklipovače

- Nástroje, které byly vědomě použity u pacientů s onemocněním na bázi prionů (přenosná spongiformní encefalopatie, CJD, BSE atd.) nebo u pacientů podezřelých z onemocnění některou z těchto chorob, není bezpečné znovu použít a musí být zlikvidovány podle schválených nemocničních postupů.

- Nástroje podezřelé z prionové kontaminace před likvidací nečistěte a/nebo nesterilizujte, protože vnesení těchto nástrojů do zařízení pro přepracování může vést ke kontaminaci ostatních nástrojů a/nebo vybavení zařízení pro přepracování.

UPOZORNĚNÍ

Ankalaps Safe/Lock Ligating Clips

Podvazovací klipy Ankalaps Safe/Lock jsou kontraindikovány pro podvazování renální tepny při laparoskopické nefrektomii dárců. Při jiných zákrocích než laparoskopické dárcovské nefrektomii doporučuje společnost Anka Sağlık Gereçleri podvazovat renální tepnu více než jedním klipem na straně pacienta s minimální manžetou distální renální tepny 2-3 mm za distálním klipem.

Klip musí být zajištěn, aby byla zajištěna správná ligace cévy nebo tkáně. Po aplikaci zkontrolujte místo podvazu, abyste zajistili správné uzavření klipu. Po podvázání je třeba potvrdit bezpečnost uzávěru.

Aplikace druhého klipu na všechny ostatní cévy (kromě renální tepny) by se měla řídit úsudkem chirurga.

Ankalaps Safe/Lock Polymer Ligating Clip není určen k použití jako tkáňový fixátor.

Společnost Anka Sağlık Gereçleri doporučuje, aby byl při endoskopických operacích s použitím klipů Ankalaps Safe/Lock k dispozici endoskopický odklipovač Ankalaps Safe/Lock..

Před použitím klipu ověřte konstrukční velikost a použijte klip správné velikosti. Systémy ligačních klipů se liší v uzavíracích vlastnostech v závislosti na konstrukci klipu a dalších proměnných. Uživatel je zodpovědný za výběr struktur pro aplikaci klipů a za potvrzení bezpečnosti klipu po jeho umístění a po použití jiných chirurgických prostředků v bezprostřední oblasti aplikace.

Zdrojem herniace mohou být sekundární místa vpichu do břicha.

Při provádění laparoskopických operací pečlivě sledujte pacienty kvůli možné plynové embolii.

Ankalaps Safe/Lock Endoskopické ligační klipové aplikátory

- Před použitím vždy zkontrolujte seřízení čelistí aplikátoru
- V zavřeném stavu by měly být špičky čelistí přímo zarovnané a neměly by být posunuté
- Zarovnání čelistí je rozhodující pro bezpečnou aplikaci klipu. Pokud tomu tak není, může dojít k poranění pacienta .
- Správná údržba, péče a čištění jsou nezbytné pro zajištění správné funkčnosti .

ZAROVN

VYCHÝLENÝ



Tento aplikátor NENÍ určen k použití s operační kanylou pro účely udržování pneumoperitonea. Při zavádění nástroje přes kanylu postupujte opatrně. Nevyvíjejte boční tlak na aplikátor, protože by mohlo dojít k poškození pracovního hrotu.

Před použitím zkontrolujte, zda nástroj není ohnutý, zlomený, prasklý nebo opotřebovaný. Aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám plynu, ujistěte se, že krytka čistícího portu těsně přiléhá na proplachovací port Luer-Lock. Pro vaše pohodlí je k dispozici náhradní uzávěr.

Vždy se ujistěte, že klip zůstává v aplikátoru po zavedení aplikátoru a klipu přes kanylu. Nepokoušejte uzavřít čelisti na cévě nebo anatomické struktuře, aniž by byl klip řádně vložen do čelistí. Zavření prázdných čelistí na cévu nebo anatomickou strukturu může mít za následek poranění pacienta. Před nasazením klipu ověřte strukturální velikost a stav cévy nebo struktury a použijte správnou velikost klipu.

Otočný knoflík by měl být aktivován pouze s čelistmi v otevřené poloze. V opačném případě může dojít k poškození aplikátoru.

Ankalaps Safe/Lock Endoskopické odklipovače ligačních klipů

Před použitím zkontrolujte vyrovnání čelistí odklipovače. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se nožičky podvazovacího klipu nerozpojí. Uživatel je zodpovědný za zjištění dostatečného rozevření ligátoru pro bezpečné vyjmutí klipu z cévy nebo anatomické struktury.

POZNÁMKA: Po vyjmutí klipu z cévy se nepokoušejte použítý klip znovu nasadit. Měl by být použit nový klip

Otočný knoflík by měl být aktivován pouze s čelistmi v otevřené poloze. V opačném případě může dojít k poškození aplikátoru.

Návod k použití klipu

Ankalaps Safe/Lock klip je obecně vhodný pro cévy a tkáňové struktury, jak je uvedeno. Výběr klipu pro konkrétní aplikace by měl být dán úsudkem chirurga.

Velikost klipu	Rozsah velikosti cév/tkáně
Středně velké	3mm-10mm
Velké	5mm-13mm
Extra velké	7mm-16mm

Vkládání klipů a zavádění aplikátoru do kanyly

1. Chcete-li vložit aplikátor, uchopte aplikátor a opatrně zasuňte čelisti aplikátoru do otvoru kazety, přičemž se ujistěte, že jsou čelisti kolmo k základně kazety. Jemně zatlačte aplikátor na zásobník, dokud se neozve slyšitelné dvojité cvaknutí. Nezasouvejte aplikátor do kazety ani do klipu silou. Aplikátor by měl snadno vstoupit do kazety a vyjmut se z ní.




2. Vyjměte aplikátor z kazety a ujistěte se, že je klip pevně uchycen v čelistech aplikátoru. Hlavice klipu by měly zapadnout do zářezů čelistí aplikátoru (obrázek 1). Může být nutné přidržet kazetu, aby bylo možné klip vyjmout.

3. Stiskněte rukojeti aplikátoru a zasuňte čelisti a hřídel aplikátoru do kanyly. Udržujte tlak na rukojeti aplikátoru, dokud čelisti neuvolní kanylu

Umístění a uzavření klipu

4. Při aplikaci orientujte jeden zub klipu podle obrázku (obrázek 1). To umožňuje uživateli vizuálně potvrdit zapouzdření podvazované struktury. Umístěte klip kolem podvazované tkáně tak, aby byla zřetelná vizualizace uzamykacího mechanismu (ilustrace 2).

POZNÁMKA: Vyvarujte se přebytečné tkáně v zajišťovacím mechanismu klipu. Použijte dostatečnou sílu na rukojeti aplikátoru, aby se čelisti zavřely a klip se uzamkl. (obrázek 3). Uvolněním tlaku na rukojeti aplikátoru se aplikátor vrátí do zcela otevřené polohy.

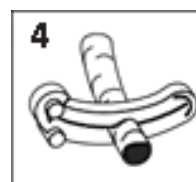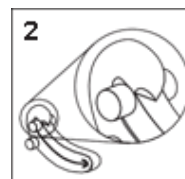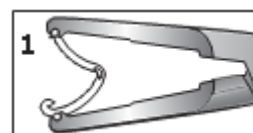

NÁVOD K POUŽITÍ ODKLIPOVAČE

Vložte endoskopický odklipovač klipů Ankalaps Safe/Lock do kanyly vhodné velikosti. Ke klipu je třeba přistupovat ze strany závěsu, nikoli ze strany zajišťovacího mechanismu. Přiblížte se ke klipu na cévě a pomocí otočného knoflíku otočte čelisti odklipovače tak, aby byly přímo nad nožičkami klipu a v jedné linii s nimi. Posouvejte odklipovač tak dlouho, dokud uživatel neuvidí, že pant klipu spočívá na zadní straně čelistí odklipovače, jak je znázorněno na obrázku.

POZNÁMKA: Závěs klipu MUSÍ spočívat v tomto kanálu, aby bylo zajištěno rozpojení nožiček klipu.

Jakmile je závěs v tomto kanálu správně umístěn, vyvíjejte na rukojeti kroužků pro odstranění mírný tlak, dokud se neozve mírné cvaknutí. To znamená, že se nožičky klipu uvolnily.

Otevřením rukojetí kroužků odstraňovače se klip na nádobě otevře. Vizualně se přesvědčte, že se klip otevřel natolik, aby bylo možné jej vyjmout.

K odstranění klipu z místa podvázání by měly být použity endoskopické kleště.

Ujistěte se, že klip zůstává otevřený, a stáhněte klip nahoru po kanyle, přičemž udržujte sílu na uchopení klipu.

PÉČE, ČIŠTĚNÍ A STERILIZACE

Čelisti ručního aplikátoru/odklipovače jsou křehké a mohou se snadno poškodit, stejně jako některé další součásti. Nesprávné zacházení s aplikátory/odklipovači může mít za následek nesprávné zatížení a/nebo zavření čelistí. Pro zajištění správné funkce je důležitá vhodná péče, čištění, mazání a údržba. Před každým zákrokem aplikátor/odklipovač prohlédněte, zda nedošlo k jeho poškození. Zvláštní pozornost věnujte čelistem. Poškozené nebo špatně nastavené čelisti aplikujícího zařízení nemusí umožnit uzavírání klipů přijatelné pro okluzi zamýšlené struktury. Poškozené čelisti odstraňovače nemusí umožnit odstranění klipů.

PŘÍPRAVA V MÍSTĚ POUŽITÍ

Bezprostředně po použití odstraňte z přístrojů hrubé nečistoty a udržujte je vlhké pro přepravu na místo zpracování. Před čištěním a sterilizací nepoužívejte žádné fixační prostředky ani horkou vodu (>104°F, > 40 °C), protože to může vést k fixaci zbytků a může to narušit proces čištění.

Endoskopické klipové aplikátory a odklipovače Ankalaps Safe/Lock jsou vybaveny čistícím otvorem, který umožňuje přístup k vnitřním kanálkům a dutinám. Odklopte čistící port, ale neodstraňujte z nástroje zcela poutko krytu. Proplachujte odstraňovač teplou destilovanou nebo filtrovanou vodou po dobu přibližně dvou minut nebo dokud se z přístroje neodstraní viditelné hrubé nečistoty.

PŘEPRAVA

Během přepravy nástroje na místo zpracování uložte kontaminovaný nástroj bezpečně do uzavřené nádoby, aby nedošlo k poškození nástroje a/nebo kontaminaci prostředí.

POKyny PRO ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCI A SUŠENÍ

Endoskopické klipové aplikátory a odklipovače Ankalaps Safe/Lock je třeba čistit samostatně podle níže uvedených pokynů.

Nástroje jsou schváleny k čištění podle následujících možností:

Pokyny pro automatické zpracování pro použití s alkalickými nebo enzymatickými detergenty	Pokyny pro ruční zpracování pro použití s enzymatickými detergenty
<p>Předčištění</p> <ul style="list-style-type: none">- Namočte přístroj do vody z vodovodu na dobu minimálně 5 minut.- Kartáčujte pod vodou, dokud neodstraníte všechny zbytky.- Propláchněte distální otočný kloub a proximální kloub rukojetí injekční stříkačkou, dokud nebude oplachová voda čirá. Čištění- Umístěte otevřený nástroj do drátěného koše na výsvněm zásobníku a zahajte proces čištění.- Předem ho 2 minuty oplachujte studenou vodou.- Vyprázdněte.- Myjte 5 minut při 55 °C (131 °F) s 0,5% alkalickým mycím prostředkem nebo při 55 °C (131 °F) s 0,8% enzymatickým mycím prostředkem.- Vyprázdněte.- Neutralizujte 3 minuty studenou vodou.- Vyprázdněte.- Oplachujte 2 minuty studenou vodou.- Vyprázdněte. <p>Poznámka: Příprava koncentrace, teplota a doba aplikace čistícího prostředku musí být v souladu s návodem k použití poskytnutým výrobcem čistícího prostředku. Detergenty musí být schváleny pro použití s kovovými všeobecnými chirurgickými nástroji pro opakované použití.</p>	<p>Předčištění</p> <ul style="list-style-type: none">- Namočte přístroj do vody z vodovodu na dobu minimálně 5 minut.- Kartáčujte pod vodovodní vodou po dobu přibližně 40 sekund, dokud nejsou viditelné žádné zbytky.- Propláchněte distální otočný kloub a proximální kloub rukojetí pomocí stříkačkou, dokud nebude oplachová voda čirá. Čištění- Vložte přístroj do ultrazvukové lázně o teplotě 40 °C (104 °F) s 0,8 % enzymatickým čistícím prostředkem.- Sonikujte po dobu 10 minut.- Vyjměte nástroj a proplachujte jej deionizovanou vodou po dobu přibližně 15 sekund. <p>Poznámka: Příprava koncentrace, teplota a doba aplikace čistícího prostředku musí být v souladu s návodem k použití, který poskytuje výrobce čistícího prostředku. Detergenty musí být schváleny pro použití s kovovými všeobecnými chirurgickými nástroji pro opakované použití.</p>
<p>Sušení</p> <p>Osušte vnější stranu přístrojů pomocí cyklu sušení čistícího zařízení. V případě potřeby lze nástroje vysušit ručně sterilním hadříkem, který nepouští vlákna. U nástrojů se světlem lze použít stlačený, filtrovaný vzduch.</p>	<p>Sušení</p> <p>Nástroje osušte sterilním hadříkem, který nepouští vlákna. U nástrojů se světlem lze použít stlačený, filtrovaný vzduch.</p>
<p>Dezinfekce</p> <p>Společnost Anka Saçlik Gerecleri neposkytuje pokyny pro dezinfekci vzhledem k poskytnutým pokynům pro sterilitu.</p>	<p>Dezinfekce</p> <p>Společnost Anka Saçlik Gerecleri neposkytuje pokyny pro dezinfekci vzhledem k poskytnutým pokynům pro sterilitu.</p>

POZNÁMKA: Je odpovědností zdravotnického zařízení zajistit dostatečné čištění kartáčů mezi jednotlivými použitími.

KONTROLA FUNKČNOSTI

Po každém sterilizačním cyklu a před každým použitím nástroje zkontrolujte, protože může dojít k jejich poškození během přepravy k zákazníkovi, při příjmu na pracovišti zákazníka, při použití při předchozím postupu nebo během čištění či sterilizace. Je třeba zkontrolovat opotřebení všech pohyblivých částí a potvrdit jejich funkčnost. Ověřte bezproblémový chod při otevírání a zavírání rukojeti nástroje a výztužného šroubu. Zkontrolujte, zda nástroje nejsou rezivělé, s důlky, prasklinami nebo otřepy, zda nemají skvrny nebo změnu barvy a zda nejsou opotřebované nebo poškozené. Opravte nebo vyměňte všechny přístroje, u nichž zjistíte, že jsou nevyhovující.

ÚDRŽBA, MANIPULACE A OBSLUHA CHIRURGICKÝCH NÁSTROJŮ

Montáž a demontáž nástroje smí provádět pouze personál vyškolený podle požadavků na školení dané instituce. Před každým použitím musí být nástroj vyčištěn, promazán, zkontrolována jeho funkčnost a sterilizován. Před sterilizací používejte nesilikonový lubrikant na vodní bázi. Nepoužívejte minerální oleje, ropné produkty nebo produkty na bázi silikonu. Nepoužívejte nástroj s poškozenými, prasklými nebo opotřebovanými částmi. Nástroj používejte pouze k určenému použití. Nesprávné použití nebo nesprávné zacházení může vést k poškození, které může mít za následek zranění uživatele nebo pacienta. Pokud je nutná oprava, vraťte čisté a sterilní nástroje společnosti Anka Sağlık Gereçleri.

BALENÍ

Po vyčištění a kontrole vložte nástroj do sterilizační nádoby nebo obalu, který chrání nástroj před okolním prostředím a zároveň umožňuje sterilizaci. Po sterilizaci by měl nástroj zůstat ve sterilizační nádobě nebo obalu kvůli ochraně před okolním prostředím a zachování sterility.

STERILIZACE

Nástroje by měly být sterilizovány v rozložené/otevřené poloze, pokud je to vhodné. Zapnuté západky mohou vést k poškození nástroje. Abyste zabránili elektrochemickým reakcím, oddělujte od sebe nástroje vyrobené z různých materiálů.

Nástroje jsou schváleny ke sterilizaci podle následujících parametrů:

Metoda sterilizace	Konfigurace přístroje	Teplota	Doba expozice (minimální)	Doba schnutí (minimum)
PreVac	Zabalený	270°F (132°C)	4 min	10 minut
PreVac	Zabalený	275°F (135°C)	3 minuty	10 minut
PreVac	Zabalený	273°F - 279°F (134°C - 137°C)	3 minuty	10 minut
PreVac	Zabalený	250°F (121°C)	30 minut	10 minut
Gravitace	Zabalený	270°F - 275°F (132°C - 135°C)	10 minut	10 minut

POZNÁMKA: Pro použití s těmito nástroji se nedoporučujeblesková sterilizace.

POZNÁMKA: Následující metody sterilizace se NEDOPORUČUJÍ, protože by mohly poškodit nástroj: sterilizace ethylenoxidem, sterilizace suchým teplem, kapalně chemické sterilizátory a chemické sterilizační plyny.

SKLADOVÁNÍ

Přístroj musí být skladován v suchém, čistém, chemicky nezávadném a bezprašném prostředí. Nástroj musí zůstat zabalený nebo ve sterilizačním kontejneru, aby byla zachována sterilita.

Další pokyny

Použití jiných metod čištění a sterilizace než těch, které poskytuje společnost Anka Sağlık Gereçleri, musí být validováno zdravotnickým zařízením pomocí příslušných validovaných laboratorních metod.

PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

MR Safe

Klipy Ankalaps Safe/Lock jsou vyrobeny z acetylhomopolymerního materiálu a podle současných kritérií a terminologie označování jsou považovány za bezpečné pro MR (bezpečný pro MR je předmět, který nepředstavuje žádné známé nebezpečí ve všech prostředích MRI). Podle této terminologie jsou "MR bezpečné" předměty nevodivé, nekovové a nemagnetické).

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O VÝROBKU


















Společnost Anka Sağlık Gereçleri vylučuje veškeré záruky, s výjimkou platné standardní záruky společnosti Anka Sağlık Gereçleri, ať už výslovné nebo předpokládané, mimo jiné včetně jakýchkoli předpokládaných záruk prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel. Společnost Anka Sağlık Gereçleri neodpovídá za žádné náhodné nebo následné ztráty, škody nebo výdaje, které přímo nebo nepřímo vzniknou v důsledku používání tohoto výrobku s výjimkou určeného použití. Společnost Anka Sağlık Gereçleri nepřebírá ani nepověřuje žádnou osobu, aby převzala Sort hem jakoukoli jinou nebo dodatečnou odpovědnost nebo odpovědnost v souvislosti s těmito výrobky.

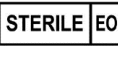ZÁRUKA NA ENDOSKOPICKÝ CHIRURGICKÝ PŘÍSTROJ

Na endoskopické aplikátory Ankalaps Safe/Lock se vztahuje dvouletá záruka na vady materiálu a zpracování a desetiletá záruka na seřízení a renovaci hrotů, pokud jsou aplikátory používány v souladu s určením pro aplikaci klipů Ankalaps Safe/Lock a nebyly opravovány neoprávněnými osobami.

OČEKÁVANÁ ŽIVOTNOST

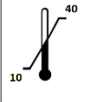Bezprostředně po každém kompletním sterilizačním cyklu by měl být nástroj před použitím zkontrolován. Nástroje by měly být zkontrolovány, zda nevykazují známky koroze, prasklin, důlků, zlomení, zbarvení a/nebo změny barvy, otřepů, ostrých hran nebo výčnělků, jakož i jakékoli jiné známky závady. Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby hřídel nástroje byla kolmá k víčku nástroje. Nástroje s jakýmkoliv známkami výše uvedených vad nejsou bezpečné pro použití u pacientů a měly by být okamžitě vyřazeny.

ANKALAPS SAFE/LOCK ENDOSKOPICKÝ PODVAZOVACÍ KLIP POPIS NA ŠTÍTKU		
1		OZNAČENÍ CE A OZNÁMENÝ SUBJEKT.
2		KATALOGOVÉ ČÍSLO
3		KÓD ŠARŽE
4		VELIKOST PRODUKTU
5		DATUM VÝROBY
6		SPOTŘEBUJTE PODLE DATA SPOTŘEBY
7		STERILIZOVANÉ POMOCÍ ETHYLENOXIDU .
8		NESTERILIZUJTE ZNOVU
9		NEPOUŽÍVEJTE OPAKOVANĚ
10		VÝROBCE
11		NEPOUŽÍVEJTE POKUD BYL OBAL OTEVŘEN NEBO POŠKOZEN.
12		SKLADUJTE NA SUCHÉM MÍSTĚ
13		CHRAŇTE PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM.
14		TEPLOTNÍ OMEZENÍ
15		OMEZENÍ VLHKOSTI
16		PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ.
17		VAROVÁNÍ



OPATRNOST:
Federální zákon (USA) omezuje prodej tohoto přístroje na prodej lékařem
nebo na jeho příkaz.

Číslo dokumentu: PC.10-

KK.02 Datum revize:

31.12.2019

Revize č.: 07