



MESI

Simplifying Diagnostics

Stručný návod

MESI BP MODULE


Bezdrátový manžetový diagnostický modul

CO JE V KRABICI?

MESI manžeta

2x manžeta - střední (LA, RA)

Model
CUFFMD

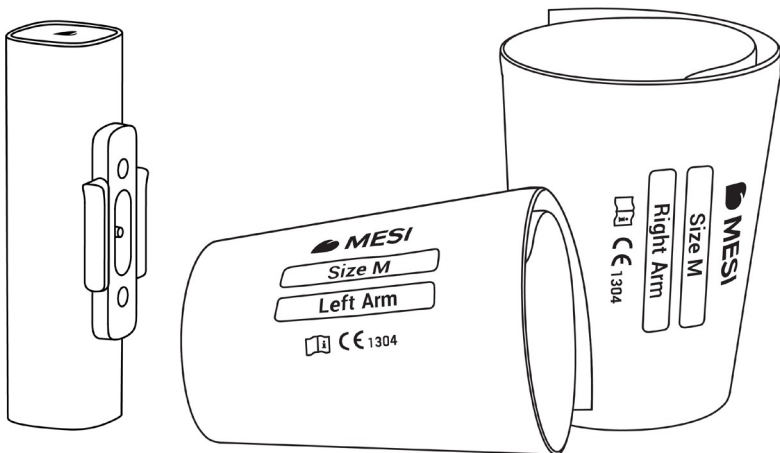

Před prvním použitím zařízení si pozorně přečtěte návod k použití a dodržujte doporučení uvedená zde: www.mesimedical.com/support/mTABLET/IFU.

PRVNÍ POUŽITÍ

1. Zapojte manžetu do jednotky

Obě manžety MESI jsou během skladování a přepravy odpojeny. Před prvním použitím připojte manžetu k portu na MESI TUBELESS CUFF UNIT, jak je znázorněno na obrázku níže. Ujistěte se, že je manžeta pevně připojena.



Používejte pouze příslušenství a další díly doporučené společností MESI. Používání jiných než doporučených nebo dodaných dílů může mít za následek úraz, nepřesné informace a/nebo poškození zařízení. Tento výrobek není určen ke sterilnímu použití.



1. Příprava pacienta

Pacient musí být v poloze vleže na zádech a být v klidu.

Krok 1 - Volba správné barvy

Zvolte vhodnou manžetu podle popisu a barvy manžety:

Pozice	Popis	Barva
Pravá paže	RIGHT ARM	ČERVENÁ
Levá paž	LEFT ARM	ŽLUTÁ


Krok 2 – Umístění manžety na příslušnou paži

- Umístěte manžetu 1-2 cm nad loketní kloub. Zarovnejte štítek Tepna s tepnou na vnitřní straně paže.
- Umístěte manžetu tak, aby mezi končetinou a manžetou byl prostor na šířku dvou prstů. Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou velikost pomocí označení SIZE a OK oblasti manžety.




POZNÁMKA: Dodržujte pokyny k použití, které jsou dodávány s manžetou.

2. Přidat/vybrat pacienta

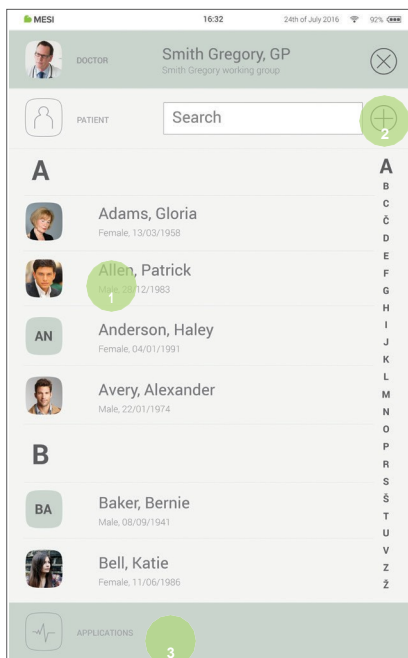


Na zařízení MESI mTABLET UNIT zvolte stávajícího pacienta (1) nebo přidejte nového (2).

3. Volba měření

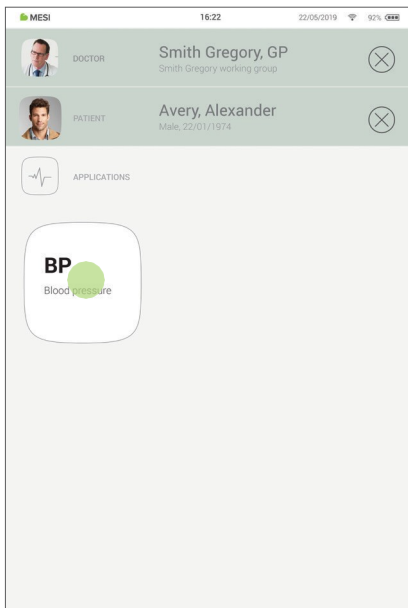


Po volbě pacienta zvolte v nabídce aplikace měření krevního tlaku.

4. Vyberte mezi měřením levé paže nebo pravé paže

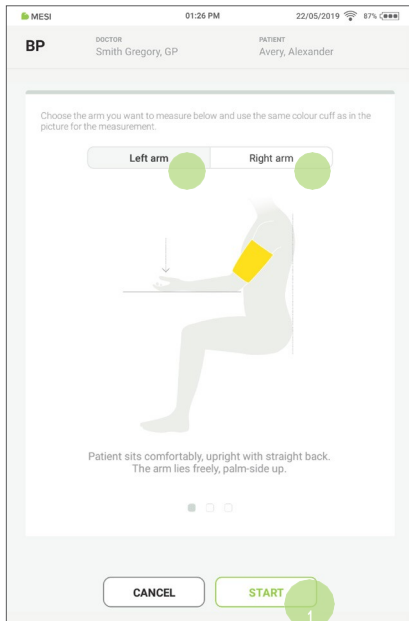

Vyberte mezi levou paží nebo pravou paží a nasadte manžetu. Stiskněte START (1).

5. Provedte měření

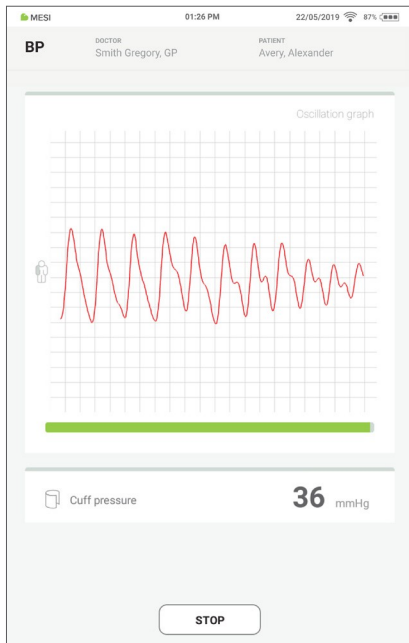

Během měření se zobrazuje graf oscilací.

6. Kontrola měření krevního tlaku

Navigation field (Navigační pole)

- Přejít na: předchozí/další výsledky
- Opakujte měření
- Sdílejte pro další názor
- Vyřadit výsledek
- Přejděte do obrazovky aplikace

Parameters (Parametry)

- Umístění senzoru
- Srdeční frekvence (bpm)
- SYS, DIA, MAP výsledek krevního tlaku (mmHg)
- Referenční stupnice výsledku

Oscillation graph and pulse wave (Oscilační graf a pulzní vlna)

History of patient (Historie pacienta)

Comment (Komentář)

Navigation field (Navigační pole)

App Interface Details:

BP | DOCTOR: Smith Gregory, GP | PATIENT: Avery, Alexander | 22/05/2019 01:26 PM | 87% battery

22/05/2019, 01:26 PM

Right arm: Sys 117 mmHg, Dia 66 mmHg, MAP 78 mmHg, Heart rate 72 bpm

Graphs: Oscillation graph, Pulse waveform

History: mmHg (25/04 to 22/05)

Comment: [Text input field]

DONE

UPOZORNĚNÍ



Uživatelé MESI mTABLET BP musí být patřičně vyškoleni v používání zařízení. Před prvním použitím zařízení si musí uživatelé prostudovat celý návod k použití a postupovat podle návodu k použití připojeného zařízení.



Před prvním použitím zařízení si pečlivě prostudujte návod k použití a dodržujte doporučení.



Neumisťujte manžety pro paže na rány, protože by to mohlo způsobit další zranění. Manžety umísťujte pouze na nadloktí.



Pokud pacientka absolvovala operaci prsu, neumisťujte manžetu na stranu, kde byla operována.



Nepoužívejte zařízení na pacientech připojených k monitoru životních funkcí.



Kontrolujte tlak v manžetě několikrát v průběhu měření. Jestliže manžeta působí tlakem na končetinu příliš dlouho, může narušit průtok krve.



Provádění příliš mnoha měření po sobě může pacientovi způsobit zdravotní újmu.



MESI TUBELESS CUFF UNIT se nesmí používat v prostředí bohatém na kyslík.