

Likvidace
jednorázových
předmětů, jako
např. čepele



Pravidla pro používání instrukcí pro sterilizaci

Tento grafický návod na zpracování obsahuje čisticí a ošetřovací spreje „Surgi-Max Drill Clean Spray“ a „Surgi-Max Drill Lubricant Spray“ od společnosti Eliquence.

Tento grafický návod ke sterilizaci nástrojů použijte ve spojení s pokyny ke sterilizaci přiloženými ke každému nástroji v návodu k použití.

Stejně záhlaví v přiložených písemných pokynech ke sterilizaci a v těchto grafických pokynech ke sterilizaci zajišťují, že budou použity správné čisticí a ošetřovací spreje.

„Čisticí sprej Surgi-Max Drill“ rozpouští všechny nečistoty, které nebyly zcela rozpuštěny vodou, a vypláchne je z nástroje.

„Surgi-Max Drill Lubricant Spray“ zajišťuje ideální lubrikaci všech pohyblivých částí uvnitř nástroje.


Okamžitě zlikvidujte nástroje, které byly v kontaktu s pacienty s CJD a vCJD. (Creutzfeldt-Jakobovou chorobou)




1. Fáze předčištění




Odstraňte malé části (chladicí spona, svorky pro uchycení hadiček, atd.) Otřete nástroje a příslušenství vlhkým papírovým ručníkem.

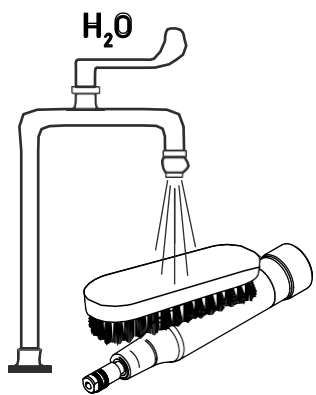

Vyčistěte rukojeti a příslušenství měkkým kartáčem pod tekoucí vodou.

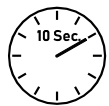


H₂O

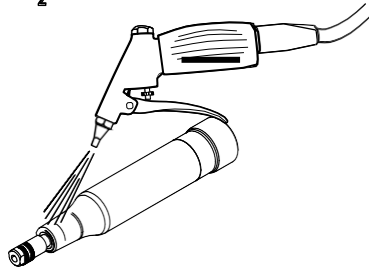

Opláchněte rukojeti vodní tlakovou pistolí.



H₂O

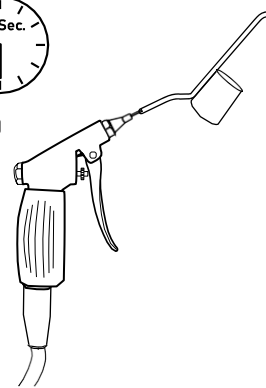

Opláchněte ty části, které mají dutiny, po dobu 30 sekund pomocí tlakové pistole se stříkačkovým nástavcem



Prostříkejte rukojeť a elektronický motor čisticím sprejem Surgi-Max Drill, dokud nepoteče pouze čistá kapalina.


Buďte Ruční čištění, desinfekce a vysušení





ID 215





Demontujte malé části a vyčistěte v ultrazvukové lázni (1% ID215, 15 min.), (chladicí svorka, příchytky pro uchycení trubiček atd.)

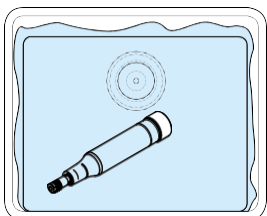


Vložte nástroje a elektronický motor do namáčecí lázně s enzymatickým čističem.

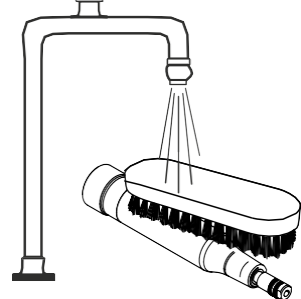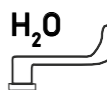


Očistěte měkkým kartáčem pod tekoucí vodou.

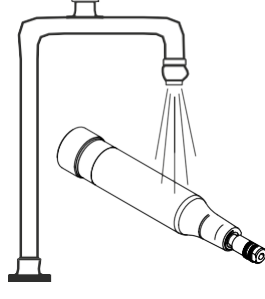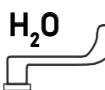

Opláchněte pod tekoucí vodou.

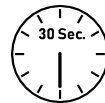


VE-H₂O

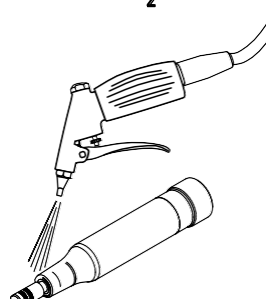


Oplachujte štěrbinu 30 sekund vodní postolí se stříkačkovým nástavcem



ID 212

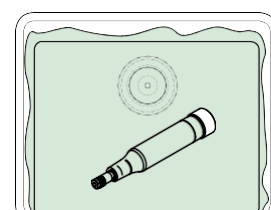


Ponořte produkty do namáčecí lázně s dezinfekčním roztokem. (2% ID 212, 5 min.)

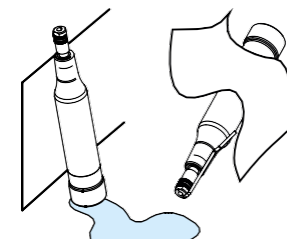

Vodu s přípravky vypusťte, otřete nástroj papírovým ručníkem a osušte stlačeným vzduchem.

Nebo: 2. Strojové čištění, desinfekce, sušení

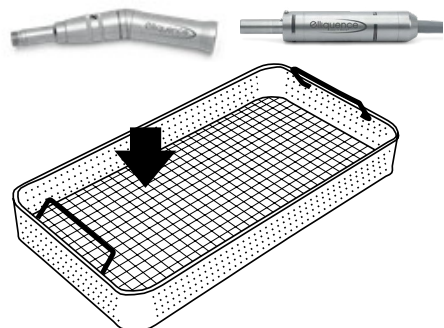

Neodisher Mediclean

ID 215




Vložte nástavce, elektronický motor atd. do děrovaného plochého spodního zásobníku.

Program Vario TD v čisticí a dezinfekční jednotce (CDU) s deionizovanou vodou vč. Sušení. (40°C 0,5% ID215) nebo (55°C 0,5% Neodisher Mediclean).

Čištění
Desinfekce


VE-H₂O

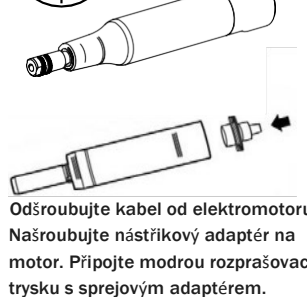

Odšroubujte kabel od elektromotoru. Našroubujte nástřikový adaptér na motor. Připojte modrou rozprašovací trysku s sprejovým adaptérem.





3. Kontrola a péče

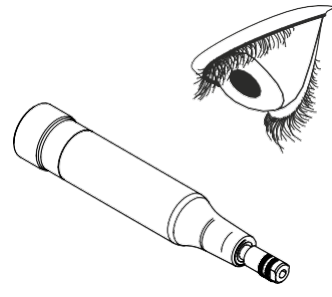

Vizuálně zkontrolujte poškození a opotřebení. Nastříkejte sprej cca. 3s a znovu sestavte příslušenství

4. Sterilizace

- Proces sterilizace párou s frakčním předvakem ve 3 fázích.
- Teplota nejméně 132 ° C.
- Doba setrvání na teplotě minimálně 3 min.
- Doba schnutí 20-30 min.

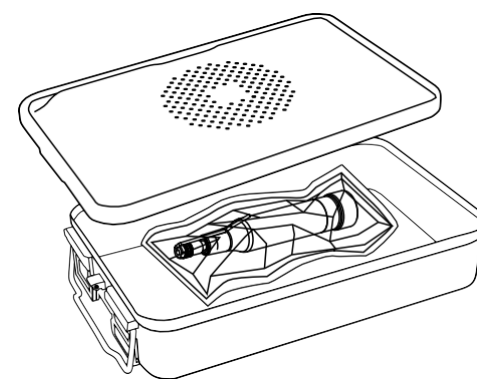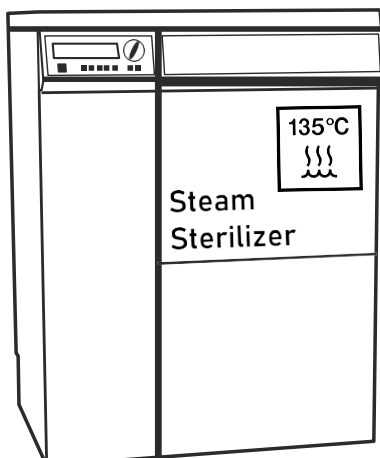

5. Uskladnění

- Chraňte před prachem, vlhkostí a znečištěním.
- Chraňte před přímým slunečním zářením.
- Poznamenejte si datum expirace
- Před použitím zkontrolujte sterilitu obalu.
- Dodržujte aseptické pokyny.

CE Mark and Identification Number
Of Notified Body. The Product
Meets The Essential Requirements
Of The Medical Device Directive.

elliquence, LLC.

2455 Grand Avenue • Baldwin, New York 11510
(516) 277.9000 • Fax: (516) 277.9001 • www.elliquence.com